


Le dispositif SunTech 247, dans toutes ses configurations, peut être fixé d'une des manières suivantes:  
 Alle Gerätekonfigurationen des SunTech 247 können folgendermaßen montiert werden:

## Sur un dessus de table/ Auf einem Tisch


1a.

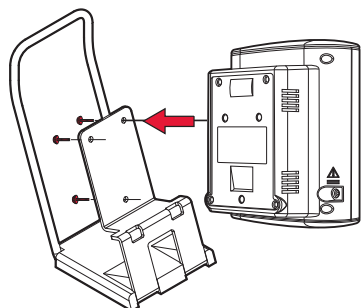

À l'aide des vis ailées, fixer le panneau arrière du dispositif de mesure de la PA au support.


Die Rückseite des BD-Geräts mit den Flügelschrauben am Ständer befestigen.

1b.

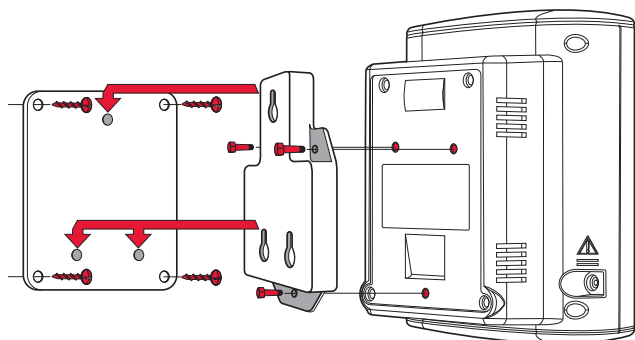

## Sur un pied mobile/ An einem beweglichen Ständer

1c.

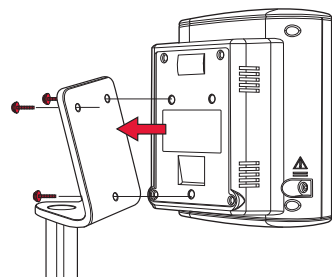


Monter le pied mobile selon les instructions du fabricant. À l'aide des trois vis ailées, fixer le panneau arrière du dispositif de mesure de la PA.

Den beweglichen Ständer den Anleitungen des Herstellers gemäß zusammenbauen. Die Rückseite des BD-Geräts mit den drei Flügelschrauben am Ständer befestigen.

## Sonde de température/ Temperatursondenkonnektors

2

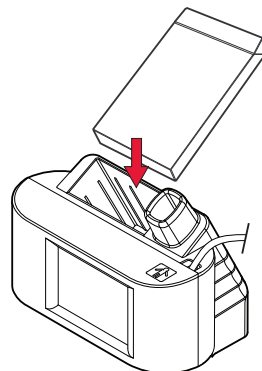


Placer la boîte du couvre-sonde dans le support.

Den Kartonhalter der Sondenabdeckung in den Halter platzieren.

## Modification de l'unité de mesure de la température/ Ändern der Temperaturmesseinheiten

5

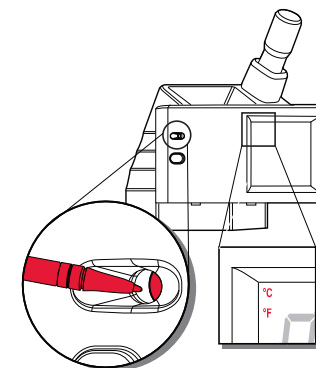


Appuyer sur le bouton du module de température à l'aide de l'extrémité d'un trombone ou d'un outil similaire. L'icône pour l'unité sélectionnée s'affiche.

Mit dem Ende einer Büroklammer oder einem ähnlichen Werkzeug den vertieften Knopf auf dem Temperaturmodul drücken. Das Symbol für die gewählte Maßeinheit leuchtet.

## Câble Sp O<sub>2</sub> /Anschließen des SpO<sub>2</sub> Sensors


3

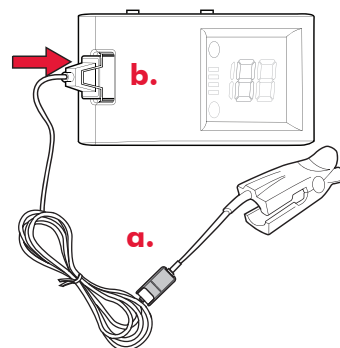

a. Brancher la sonde sur le câble de rallonge.  
 b. Brancher le câble sur le dispositif. Fixer le câble à l'appareil à l'aide du clip de maintien.


a. Den Sensor am Verlängerungskabel anschließen.  
 b. Das Kabel mit dem Gerät verbinden. Das Kabel mit dem Halteclip am Gerät sichern.

6

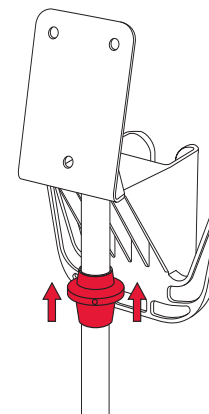

## Branchement de l'alimentation/ Stromanschluss


4

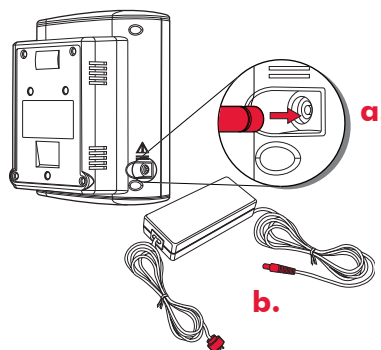

a. Brancher le bloc d'alimentation sur le module de PA.  
 b. Connecter le bloc d'alimentation à l'alimentation secteur. Le dispositif s'allumera automatiquement. Avant d'utiliser le dispositif, charger complètement la batterie pendant 8 heures.

a. Das Netzteil am BD-Modul anschließen.  
 b. Das Netzteil an ein Wechselstromnetz anschließen. Das Gerät schaltet sich automatisch ein. Vor dem Gebrauch des Geräts die Batterie über 8 Stunden vollständig aufladen.


7

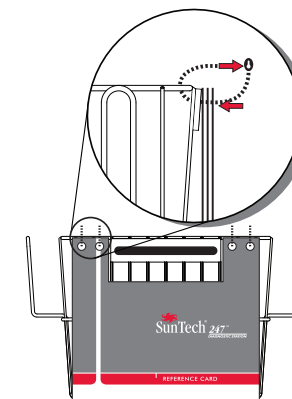

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE SCHNELLSTART-ANLEITUNGEN

### Vue d'ensemble/ Vogelperspektive

Clé: Matériel, Interface  
Schlüssel: Hardware, Schnittstelle

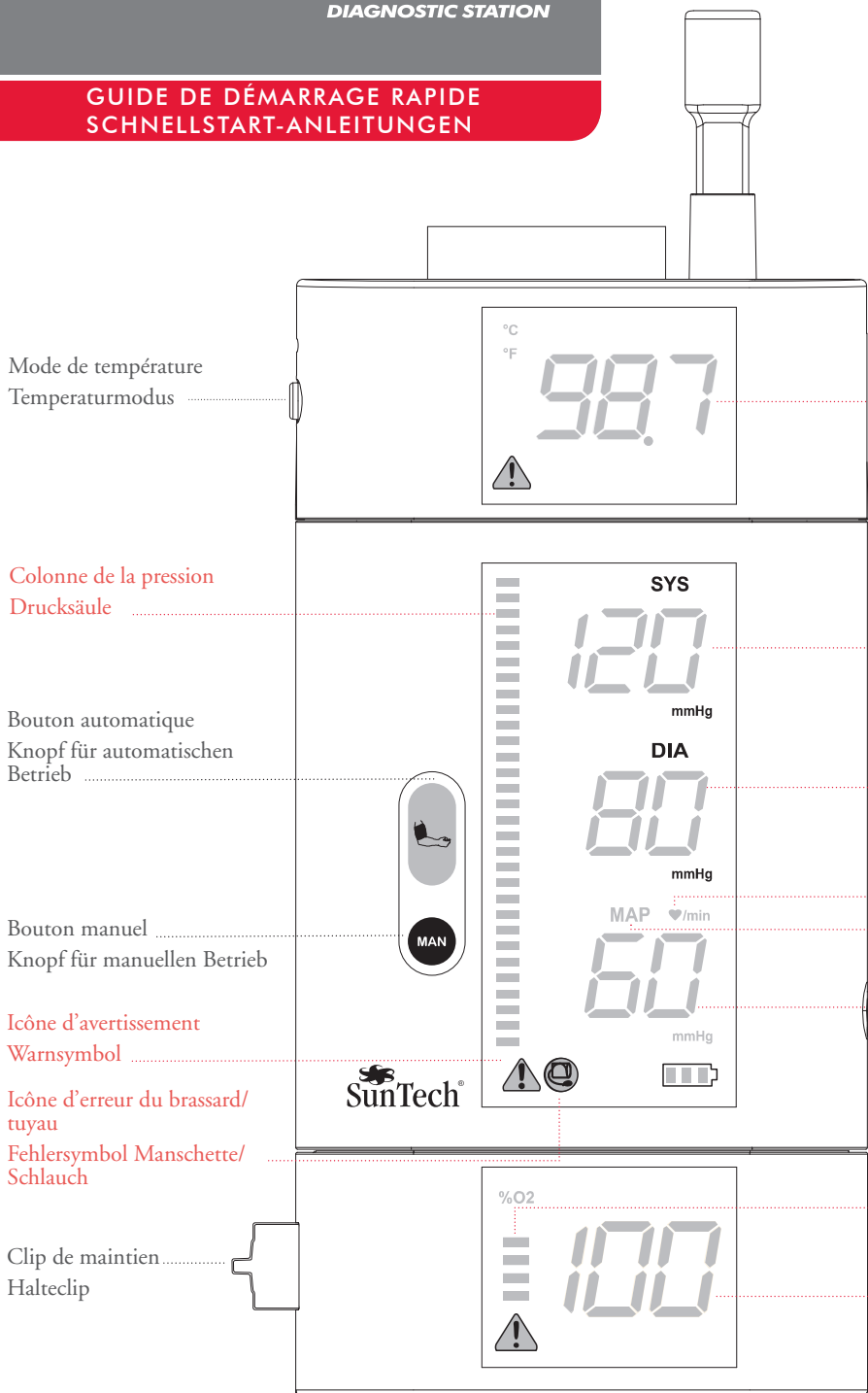

Température  
Temperatur

PA systolique/Pression de  
brassard  
Systolischer BD-/  
Manschettendruck

PA diastolique  
Diastolischer Blutdruck

Clé de fréquence du pouls  
Pulsfrequenzsymbol


Clé Pression artérielle moyenne (PAM)  
Mittlerer arterieller Druck (MAP)-Symbol

Fréquence du pouls/PAM  
Pulsfrequenz/MAP

Qualité du signal  
Signalqualität

SpO<sub>2</sub>  
SpO<sub>2</sub>

### Versions/ Versionen

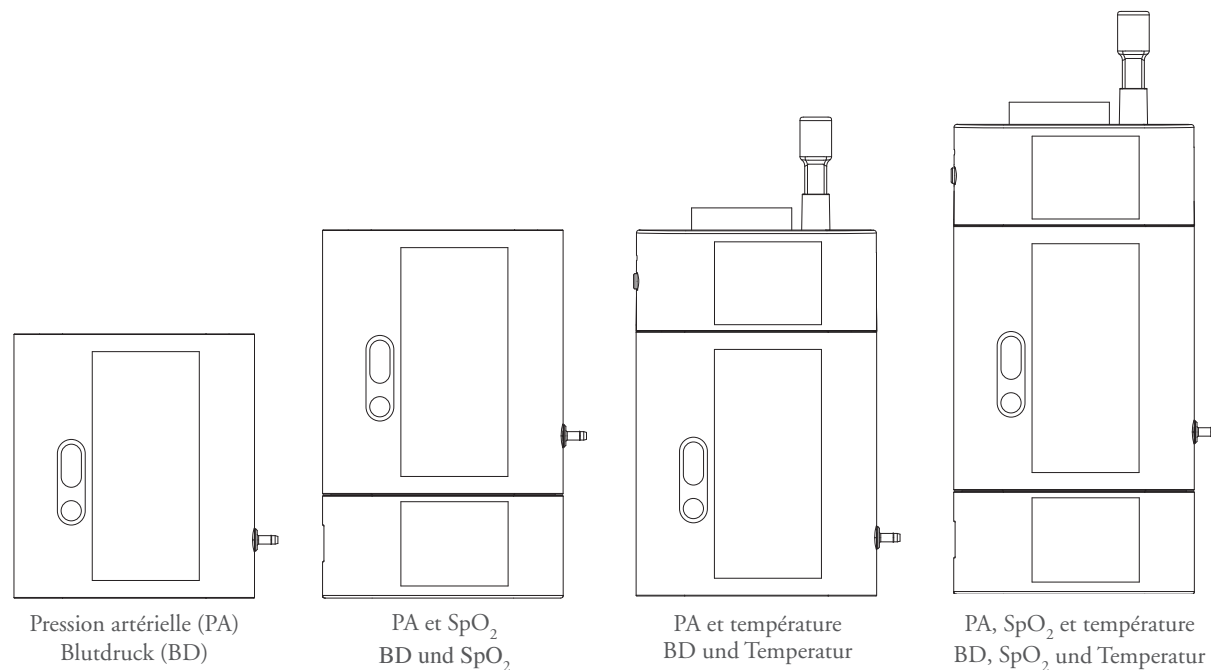

### Contenu et accessoires/ Inhalt und Zubehör

